


LEIÐBEININGAR FYRIR AIRFORCE MINI

AirForce Mini er lítil úðavél með hleðslubatteríi. Lítil og létt, auðveld í notkun og hentar vel til að vera með á ferðinni.

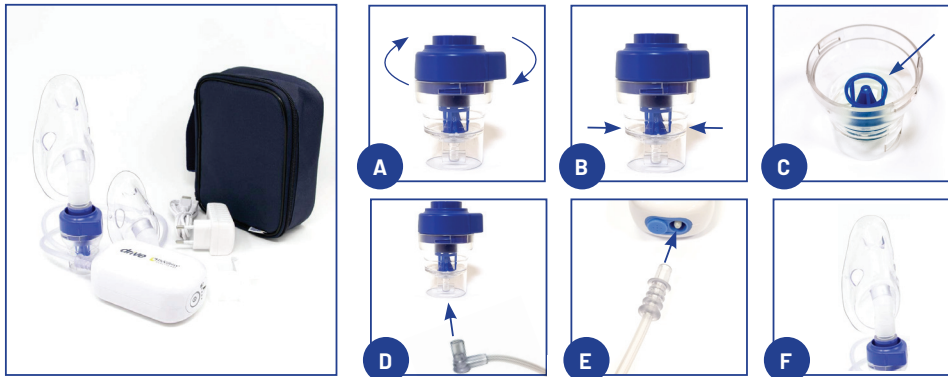

Notkunarleiðbeiningar

1. Hlaðið tækið.
2. Skrúfið bláa lokið af (**mynd A**)
3. Gangið úr skugga um að bláa keilan sé rétt staðsett í lyfjahlýkinu (**mynd B**)
4. Hellið réttu magni af uppáskrifuðu lyfi (2-6 ml) í lyfjahlýkið (**mynd C**)
5. Lokið lyfjahlýkinu og gætið þess að það sé vel þétt.
6. Tengið endann á loftslöngunni (**mynd D**) beint í lyfjahlýkið og hinn endann í tækið sjálft (**mynd E**)
Ef notaður er maski er honum smelli á munnstykkið á úðabrusanum (**mynd F**)
7. Kveikið á tækinu og hefjið meðferð. Hægt er að nota tækið á meðan það er í hleðslu. ATH. Ef langur tími líður á milli þess sem tækið er notað, skal hlaða það að fullu á 3 mánaða fresti.
8. Ekki er mælt til þess að meðferð standi lengur en 30 mín í senn.

Hvernig skal þrifa tækið?

- Tækið lyfjahlýkið í sundur, alla aukahluti af og látið liggja í heitu vatni.
- Leyfið hlutunum að þorna vel áður en tækið er sett saman.
- Passið vel að enginn vökví komist inn í tækið sjálft, þar sem rafhlaðan er.
- Skiptið um lyfjahlýki á 6-12 mánaða fresti.
- Skiptið um filter á ca 6 mánaða fresti, en fyrr ef vart verður við litabreytingar.
- Ekki má þrifa filterinn og endurnota.

